

IMPLANTÁTUM KÁRTYA



PÁCIENS INFORMÁCIÓ

• Kérdezze meg orvosát a közvetlenül a műtét után és a következő napokban követendő magatartásról, például a hideg borogatás típusáról és gyakoriságáról, illetve az alkalmazandó gyógyszerekről. Ne végezzen fizikai tevékenységet és/vagy ne szaunázzon az első 24 órában. Ne igyon alkoholt, ne fogyasszon nikotint, ne igyon teát és kávét az első pár nap során. Ne rágjon azon a területen, ahová az implantátumot behelyzték. Tisztítsa rendszeresen az implantátumok környékét, hogy azokon ne maradjanak lerakódások, ételmaradékok. Használja az implantátumokat ahogyan a fogait. Gondoskodjon a megfelelő és folyamatos szájhygiénáról. Forduljon fogorvosához, ha fájdalmas területeket érzékel, vagy ha a rögzített, illetve a kivethető protézisek elmozdulását észleli. Mielőtt MRI vizsgálatot hajtanának végre, tájékoztassa az egészségügyi dolgozót a fogászati implantátumok jelenlétéről. A titán fogászati implantátumok javarészt nem zavarják a mágneses rezonanciás képalkotást.



www.c-tech-implant.com



POZÍCIÓ	Implantátum címke

MEGJEGYZÉSEK

SZERKEZET

Kód	∅	L.	Lot.
UDI			



DENTAL IMPLANT




